

Infos Otiom Home-Base Platzierung:

Technischer Hintergrund: Die Home-Base



Die Otiom-Basisstation ist der Dreh- und Angelpunkt des Otiom-Systems. Sie hat eine Reichweite von 5-20m.

Diese kostengünstigen Geräte können überall montiert werden und schaffen auf diese Weise einen sicheren Heimatbereich für Wohnbereiche jeder Größe, angefangen bei einstöckigen Privatwohnungen bis hin zu mehrstöckigen Pflegeheimen mit mehreren hundert Bewohnern.

Jede Home-Base erzeugt ein kugelförmiges Funkfeld von bis zu ca. 20m Durchmesser. Die genaue Reichweite sollte vor Ort getestet werden und ist abhängig von den baulichen Gegebenheiten. Sie können mehrere Home-Bases nebeneinander bzw. auch überlappend einsetzen um einen größeren Bereich abzudecken.



Ziel ist es, den gesamten erlaubten Aufenthaltsbereich im Innenraum der zu betreuenden Person mit Home-Bases (HB) auszustatten = Geborgenheitsbereich.

Solange sich die Person, die das Otiom trägt, innerhalb dieses Heimatbereichs aufhält, wird davon ausgegangen, dass er oder sie in Sicherheit ist – in dieser Zeit befindet sich das gesamte Otiom-System in einem energiesparenden Ruhemodus. In der App wird dann der entsprechende Punkt angezeigt.

Prüfen der Reichweite

Sie können sich die Empfangsstärke der Home-Bases in der Otiom-App am aktuellen Standort anzeigen lassen.

1. Sie haben die grundsätzliche erste Inbetriebnahme abgeschlossen. Bluetooth ist aktiviert.
2. Begeben Sie sich zu dem Standort, wo Sie die Reichweite prüfen möchten.
3. Loggen Sie sich als Admin ein.
4. Tippen Sie im Verwalter Menü auf „Bearbeiten Sie die Otiom“ Basis.
5. Im „Bearbeiten Sie die Otiom Benutzer“ Menü, tippen Sie auf das Herzschlagsymbol oben rechts.
6. Die Anzeige ändert sich.
Sie sehen nun alle Home-Bases, die dem Benutzer zugeordnet sind.
7. Die Anzeige zeigt die Empfangsstärke an Ihrem aktuellen Standort (dort wo Sie mit Ihrem Smartphone stehen) an:
grün = hervorragend, gelb = schwach, rot = kann aktuell nicht empfangen werden.
8. Bewegen Sie sich durch die Räumlichkeiten, wo der Nutzer sich im Gebäude aufhalten kann.
Ziel ist es, den gesamten erlaubten Aufenthaltsbereich im Innenraum der zu betreuenden Person so mit Home-Bases (HB) auszustatten, dass jederzeit mindestens eine Home-Base mit mindestens gelber Signalstärke zu sehen ist.
9. Verschieben Sie die Home-Bases solange oder fügen solange Home-Bases hinzu bis der Bereich versorgt ist.
Sie können Home-Bases portofrei bei uns im Shop portofrei nachbestellen.

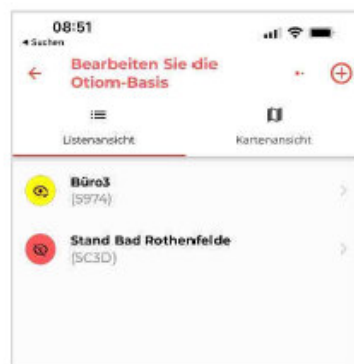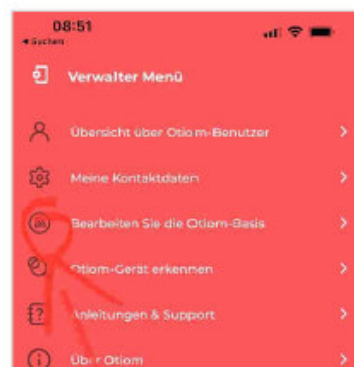

Tipp: Eine Home-Base sollte zwingend im Bewohner-Zimmer montiert sein, damit der Empfang auch gewährleistet ist, wenn der Bewohner auf dem Otiom Tag liegt bzw. er den Tag abschirmt.